Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD DR. CARLOS MALBRAN INSTITUTO NACIONAL DE PARASITOLOGIA DR. MARIO FATALA CHABEN

Av. Paseo Colón 568 – Buenos Aires / Argentina TEL: (54 11) 4331-2330/7732/4010/16/17/19 * FAX:(54 11) 4331 7142

ENVIO DE MUESTRAS

- · Comunicarse siempre previamente con referente
- Remitir las muestras, en lo posible, dentro de las 24 Hs. de obtenidas
- Refrigeradas, no congeladas (en conservadoras de telgopor)
- En rigurosas condiciones de seguridad, en envase plástico irrompible, flecha indicativa de posición superior
- ROTULADAS. Con Ficha resumen de historia clínica.
- Datos claros del remitente con contacto TE o E-mail

Para Serología:

- 3 cc de suero en tubo seco, con tapa a rosca de seguridad.
- Hasta 48-72 hs, refrigerado a 2-8 grados. Más tiempo congelarlo.
- Frotis o extendidos de PAMO:
- Proteger el preparado del calor y la humedad, luego de secado, de ser posible fijar con Metanol por 5minutos. ROTULARLOS claramente.

Punción-aspiración MO:

- Toma de muestra en condiciones de esterilidad. Colocar muestras en tubo estéril
- PAMO con anticoagulante si es para cultivo.

Biopsias de tejidos:

- Para cultivo: en frasco estéril sumergir la muestra en 2-3 cc de PBS o Solución Fisiológica más ATB, en una concentración final de 100U de Penicilina y 100µg de Estreptomicina por ml.
- Para Histopatología: en Solución de Formol Buffer al 10%.

Contactos: Dra. Adelina Riarte ariarte@yahoo.com

Dr. Angel Sinagra ajsinagra@yahoo.com.ar

Dra. Concepción Luna caluna00@yahoo.com

Dra. Victoria Fragueiro vickyfragueiro@hotmail.com Vanesa Negri vanesanegri@hotmail.com